

Get Started



[Link zur App](#)

WIE FUNKTIONIERT SKINSCREENER IM DETAIL?

- Sie bekommen eine Risikoeinschätzung zu Hautkrebs mit Ihrem iPhone
- Speichern Sie die Bilder inklusive der Risikobeurteilung in Ihrem Archiv
- Erhalten Sie Informationen zu Ihrem lokalen UV-Index
- Informieren Sie sich über News, Tipps und Stories zu Ihrer Hautgesundheit
- Erhalten Sie Erinnerungen für Scans oder Arztbesuche

 **SkinScreeener** A Trademark by medaio

skinscreener.com
office@skinscreener.at



VORAUSSETZUNGEN



Aktive E-Mail
Adresse



Speicherplatz:
250 mb



Freigabe für die
Kamera



Smartphone mit 3 GB
Arbeitsspeicher

DOWNLOAD

1. Scannen Sie den QR Code mit Ihrer Kamera oder dem QR-Code Scanner Ihres Vertrauens. Alternativ: Suchen Sie die App im Google Play Store (Android) oder im Appstore (iPhone)
2. Installieren Sie die App auf Ihrem Smartphone und melden Sie sich an
3. Geben Sie der App Zugriff auf Ihre Kamera
4. Schließen Sie die App vollständig indem sie von der Mitte Ihres Screens nach oben wischen und das Fenster der APP noch einmal nach oben wischen

EINLÖSEN DES LIZENZCODES

1. Öffnen Sie redeem.skinscreener.com in Ihrem Browser
2. Melden Sie sich mit jener E-Mail Adresse an, die Sie in der App verwendet haben
3. Geben Sie Ihren Lizenz Code ein, den Sie von uns erhalten haben
4. Schließen Sie Ihren Browser und öffnen Sie die App erneut. Sie sind jetzt mit Ihrem Lizenz Code angemeldet.

BEGINNEN SIE ZU SCANNEN

1. Halten Sie ihr Smartphone in einer stabilen und ruhigen Position für 3 bis 5 Sekunden
2. Nach erfolgreicher Fokussierung beginnt die App mit dem automatischen Scannen
3. Der Scan wird dann durch unser klinisch erprobtes neuronales Netzwerk geleitet
4. Sie erhalten sofort das Ergebnis. Die Risikoabschätzung für Hautkrebs wird durch einen leicht verständlichen 3-Farbcode (Grün bedeutet niedriges Risiko, Gelb bedeutet mittleres Risiko, Rot bedeutet hohes Risiko) angezeigt.